

Pflegehinweise

Alle Materialien unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess. Zur Aufrechterhaltung der Garantieansprüche und zur Verlängerung der Lebensdauer ist es notwendig, die Schrankoberfläche und das Zubehör materialgerecht zu reinigen und zu pflegen. Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbveränderungen am Produkt verursachen.

Die Pflege von Pulverbeschichtungen hat mit weichen, nichtfasernden Tüchern mit entweder lauwarmem, klarem Wasser oder unter Zugabe von neutralen bis schwach alkalischen Reinigungsmitteln zu erfolgen (pH7). Auf den Einsatz von Mikrofasertüchern und scheuernden Schwämmen ist zu verzichten. Wischen Sie die Oberfläche des Patientenschrankes und evtl. Zubehörs (z. B. elektronische Zahlenschlösser) mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch ab. Kein Wasser/ keine flüssigen Desinfektionsmittel im Möbel stehen lassen, kein Spritzkontakt. Zudem sind keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung zu nutzen. Auf keinen Fall dürfen scheuernde, stark saure oder alkalische Reinigungs- oder Netzmittel verwendet werden (wie z.B. Allesreiniger, Einfetter, Scheuermilch).

Die Reinigungsmittel dürfen max. 25°C aufweisen. Die Oberflächentemperatur des Möbels darf während der Reinigung ebenfalls 25°C nicht übersteigen.

Starkes Reiben ist zu unterlassen. Keine Dampfstrahlgeräte oder Hochdruckreiniger verwenden. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang mit einem trockenen, weichen und nichtfasernden Tuch nachwischen.

Bitte beachten:

- Herstellerangaben zur Verwendung, Dosierung und Einwirkzeit von Reinigungs- / Desinfektionsmitteln sind zu beachten und müssen vorab auf Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle des Möbels getestet werden.
- Möbel für Innenräume sind grundsätzlich immer bei normalen Zimmertemperaturen zu lagern. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen bzw. Luftfeuchten sind zur Möbellagerung ungeeignet. Kondenswasser darf sich nicht absetzen.
- Die Möbel dürfen keinen extremen Temperaturunterschieden/-schwankungen ausgesetzt werden.
- Möbel in einer sauberen Umgebung lagern, die normalen Raumanforderungen entspricht.
- Bitte lagern Sie die Möbelstücke fern von Wärmequellen sowie ohne Kontakt zu Chemikalien, Rauchgasen, korrodierenden Oberflächen oder ähnlichem.
- Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung (auch hinter Glas) oder anderen Quellen ultravioletter Strahlung schützen.