



## So entnehmen Sie eine bukkale Zell-DNA-Probe:

Der Hund sollte mindestens 2 Stunden vorher nicht gefressen haben, um Fremd-DNA in der Probe zu vermeiden. Ebenfalls sollte er in dieser Zeit nicht mit anderen Hunden spielen oder auf andere Weise an Fremd-DNA gelangen. Welpen testet man am besten nach dem Schlafen.

Öffnen Sie die Tupferhülsen vorsichtig. Entsorgen Sie die Hülsen nicht! Die Tupfer werden in die Originalverpackung zurückgelegt. Berühren Sie nicht die Bürstenspitzen der Tupfer.

Entnehmen Sie die Wangenzellen, indem Sie das Borstenende für ca. 15 Sekunden fest zwischen Wange und Zahnfleisch rollen. Die Entnahme der Proben sollte mit 3 Tupfern an verschiedenen Stellen links und rechts im Wangenbereich erfolgen. Die Farbe des Tupfers ändert sich dabei nicht.

Die Tupfer 5 Minuten an der Luft trocknen lassen. Nasse Tupfer sind anfällig für Verunreinigungen.

Nach dem Trocknen die Tupfer wieder in die Originalverpackungen legen und mit einem Barcode-Aufkleber verschließen.

**Versenden Sie die Proben** mit dem beigefügten Umschlag. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald die Ergebnisse vorliegen. Die Ergebnisse werden 4 bis 6 Wochen nach Eingang der Proben im Labor im MyDogDNA-Profil des Hundes verfügbar sein.

