

# Oplaadmogelijkheden voor ReSound-producten

ReSound biedt oplaadbare oplossingen met inductief opladen en een lange levensduur van de batterij zodat u altijd actief kunt blijven.

## OPLAADBARE LADERS DIE PASSEN BIJ VERSCHILLENDE RESOUND-COLLECTIES



### De Premium oplader werkt met:

OMNIA™ RIE's, ReSound ONE™ RIE's, ReSound LiNX Quattro™ RIE's en ReSound Key™ RIE's – met afzonderlijk inzetstuk voor elk model.



### De Standaard oplader werkt met:

ReSound OMNIA RIE's en ReSound ONE RIE's.



### De Bureau-oplader werkt met:

ReSound OMNIA RIE's, ReSound ONE RIE's, AHO's en Power AHO's. ReSound LiNX Quattro RIE's en ReSound Key RIE's – met afzonderlijk inzetstuk voor elk model.




### De Custom oplader werkt met:

ReSound ONE ITC en IHO.

## WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN PREMIUM/DESKTOP OPLADERS

Kijk binnenin voor het nummer dat overeenkomt met de specifieke ReSound-hoortoestellencollectie.

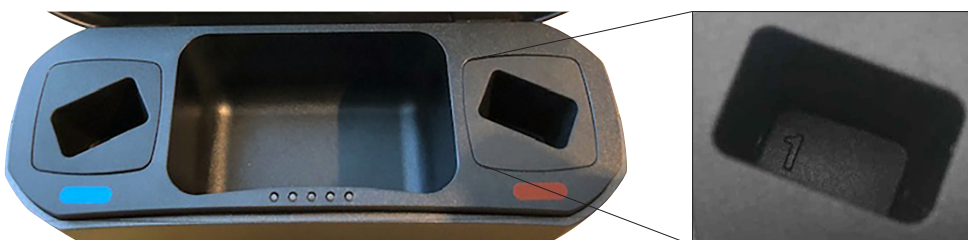

**Bij de ReSound OMNIA en ReSound ONE RIE** staat het nummer 1 vermeld op het inzetstuk.

**Bij de ReSound ONE BTE** staat het nummer 70 vermeld op het inzetstuk en bij de Power AHO staat het nummer 80 vermeld op het inzetstuk.

**De ReSound LiNX Quattro en ReSound Key RIE's** hebben geen nummer of het nummer 3 is vermeld op het inzetstuk.



## KENMERKEN VAN DE OPLADER

	ReSound OMNIA & ONE			ReSound ONE			ReSound LiNX Quattro		ReSound Key	
	Premium oplader	Standaard oplader	Bureau-oplader	Bureau-oplader	Bureau-oplader	Custom oplader	Premium oplader	Bureau-oplader	Premium oplader	Bureau-oplader
	RIE	RIE	RIE	AHO	Power AHO	Op maat gemaakt	RIE	RIE	RIE	RIE
Inductief laden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Draagbaar met ingebouwde powerbank	•						•		•	
Draagbaar zonder powerbank		•				•				
USB-C-aansluiting en -kabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Led achteraan	Geeft de batterijstatus weer van de powerbank	Brandt wanneer de oplader is aangesloten op de netvoeding	Geeft aan wanneer de oplader is aangesloten op de voeding	Geeft aan wanneer de oplader is aangesloten op de voeding	Geeft aan wanneer de oplader is aangesloten op de voeding	Geeft aan wanneer de oplader is aangesloten op de voeding	Geeft de batterijstatus weer van de powerbank	Geeft aan wanneer de oplader is aangesloten op de voeding	Geeft de batterijstatus weer van de powerbank	Weergeven wanneer de oplader is aangesloten op de voeding
Led aan de voorkant	Geeft de HI's lading weer					Geeft de HI's lading weer	Geeft de HI's lading weer		Geeft de HI's lading weer	
HI's uren van gebruik wanneer ze volledig zijn opgeladen	Tot 30 uur	Tot 30 uur	Tot 30 uur	Tot 25 uur	Tot 23 uur	Tot 24 uur	Tot 30 uur	Tot 30 uur	Tot 30 uur	Tot 30 uur
Prijscategorieën beschikbaarheid	9, 7, 5	9, 7, 5	9, 7, 5	9, 7, 5	9, 7, 5	9, 7, 5	9, 7, 5	9, 7, 5	4	4

## HOE WEET U OF DE HOORTOESTELLEN OPLADEN?

Plaats de hoortoestellen in de oplader en let op het lampje op de hoortoestellen. Het proces is hetzelfde voor elke oplader.

U weet dat het opladen is begonnen als de lampjes van het hoortoestel langzaam beginnen te knippen.

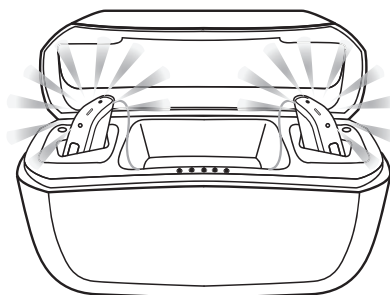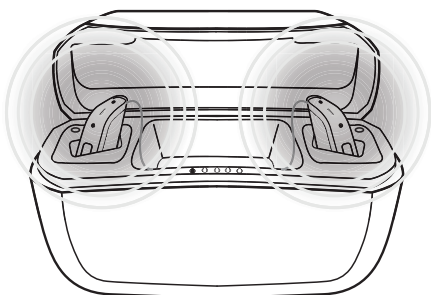

Als het hoortoestel volledig is opgeladen, blijft het lampje constant branden en knippert het niet meer.

De lampjes gaan uit als u de hoortoestellen uit de oplader haalt.

Premium oplader afgebeeld. Raadpleeg de individuele gebruikershandleiding van elke oplader voor meer informatie.

**Internationaal hoofdkantoor**  
GN ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Denemarken  
Tel.: +45 4575 1111  
resound.com

**Verenigd Koninkrijk**  
GN Hearing UK Ltd.  
Unit 13  
Talisman Business Centre  
Bicester  
Oxon OX26 6HR  
Tel.: +44 1869 352800  
resound.com

**Australië**  
GN Hearing Australia Pty Ltd  
Gate C, 19-25 Khartoum Road  
Macquarie Technology Park  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: (gratis) 1800 658 955  
resound.com

**Nieuw-Zeeland**  
GN Hearing New Zealand Limited  
Ground Floor, North Entrance  
4 Fred Thomas Drive  
Takapuna, Auckland, 0622  
Tel.: (gratis) 0800 900 126  
resound.com

**Singapore**  
GN Hearing Pte. Ltd.  
456 Alexandra Road,  
#22-01,  
Singapore 119962  
Tel.: +65 6320 9388  
resound.com

CVR-nr. 55082715